

## PROOVIMATERJALI VÕTMINE QUANTIFERONI KOMPLEKTIGA

1. Tuberkuloosi sõeluuringu teostamiseks kasutatakse QuantiFERON®-TB Gold Plus katsutite komplekti, mis sisaldab järgmisi katsuteid:

- 1.1. hall – lisanditeta katsuti;
- 1.2. roheline – TBC-spetsiifiliste antigeenidega katsutid;
- 1.3. kollane – TBC-spetsiifiliste antigeenidega katsutid;
- 1.4. lilla – mitogeeniga katsuti.



### 2. Vere võtmise juhend:

- 2.1. Verd võtta katsutitesse järjekorras hall, roheline, kollane ja lilla.
- 2.2. Võtta igasse QuantiFERON®TB Gold Plus katsutisse 1 ml verd.
- 2.3. Kõigis katsutites peab olema verd võrdselt musta märgistuseni katsutil. Kui vere tase on mõnes katsutis väljaspool indikaatortähise vahemikku (must tähis katsuti küljel), siis analüüsi ei teostata ja palutakse uus proovimaterjal.
- 2.4. Kui veri voolab liiga aeglaselt, võib verevõtmiseks kasutada ka süstlaid.
- 2.5. Kuna veri voolab suhteliselt aeglaselt, jätke katsuti pärast näilise täituvustaseme saavutamist veel 2-3 sekundiks nõela otsa. Sellega on tagatud vajaliku verekoguse saamine.
- 2.6. Kui vere võtmisel kasutatakse libliknõela, tuleb tühja katsuti abil veenduda, et toru oleks enne QuantiFERON®-TB Gold Plus katsuti otsapanekut täidetud.
- 2.7. Segage katsuti sisu, keerates katsutit vähemalt 10x edasi-tagasi kuni kogu tuubi sisu on kaetud verega.

### 3. Proovimaterjalide markeerimine ja sidumine tellimusega

- 3.1. Kõik neli katsutit markeerida nime ja isikukoodiga.
- 3.2. Ühele katsutile kleepida ribakood „materjal“ MTxxxxxxx ja siduda korrektse tellimusega.

### 4. Proovimaterjali transport

- 4.1. Katsutid toimetada võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 8 tundi pärast vere võtmist, laborisse (toatemperatuuril säilib 8h).